



Arthrodese koker

Een arthrodese koker is een orthese. Een orthese is een hulpmiddel ter correctie van lichaams-afwijkingen. Afhankelijk van de doelstelling heeft een orthese een ondersteunende, stabiliserende of ontlastende functie. Wij hebben dit hulpmiddel op maat gemaakt volgens een model dat wij van uw been genomen hebben. De voorziening is gemaakt van duurzaam kunststof-materiaal, leder of klittenband. Deze folder voorziet u onder meer van informatie over het doel, gebruik en onderhoud van dit hulpmiddel.

DOEL HULPMIDDEL

Het doel van dit hulpmiddel is het stabiliseren van uw knie of enkel.

GEBRUIK

Het aantrekken van de orthese gaat doorgaans het beste als u over uw been een sok of kous draagt. Laat uw voet in zittende positie in de orthese glijden en bevestig vervolgens de sluiting. Trek daarna een kous over de orthese aan; sluit dan uw schoen. De lederen materialen worden over het algemeen goed verdragen door de huid. In enkele gevallen hebben wij allergische reacties waargenomen. Dit heeft dan veelal te maken met de gebruikte looistoffen. Draag het hulpmiddel altijd als u naar buiten gaat. Binnen kunt u de orthese ook dragen, maar dit hoeft niet als het niet noodzakelijk is. Als u de orthese binnen niet draagt, loop dan voorzichtig en voorkom dat u struikelt.

Controleer met name in het begin uw huid op verkleuringen na het dragen van de orthese. Een lichte verkleuring (die binnen vijf minuten na het uittrekken van de beugel verdwijnt) is normaal gesproken geen probleem. Houdt de verkleuring echter langer aan of ervaart u pijn, neem dan contact op met één van onze vestigingen voor een controleafspraak.

ONDERHOUD

Reinig uw orthese wekelijks met een vochtige doek. Wanneer uw hulpmiddel ook over scharnieren beschikt, smeer deze dan met naaimachineolie. Deze olie heeft een zeer hoge zuiverheid en is zuurvrij.

GARANTIE

Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorwaarden die afgesproken zijn met zorgverzekeraars. Deze voorwaarden zijn op verzoek bij onze beide vestigingen ter inzage beschikbaar.

SERVICE

Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze hulpmiddelen. Mocht blijken dat u niet (geheel) tevreden bent over uw hulpmiddel of de manier waarop wij u geholpen hebben, neem dan contact op met één van onze vestigingen. Wij zijn een erkend leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001-gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge eisen die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.



Centrum
Orthopedie
Rotterdam