



# Kunststof EVO in de schoen

**Een kunststof EVO is een orthese. Een orthese is een hulpmiddel ter correctie van lichaams-afwijkingen. Afhankelijk van de doelstelling heeft een orthese een ondersteunende, stabiliserende of ontlastende functie. Dit hulpmiddel is fabrieksmatig gemaakt en individueel aan uw been aangepast. In sommige gevallen maken wij dit hulpmiddel volledig op maat. Uitgangspunt is altijd een optimale pasvorm te garanderen. De voorziening is gemaakt van een duurzaam kunststof-materiaal, dat goed door de huid verdragen wordt. Wij hebben hier tot op heden geen allergische reacties van waargenomen. Deze folder voorziet u onder meer van informatie over het doel, gebruik en onderhoud van dit hulpmiddel.**

## DOEL HULPMIDDEL

Het doel van dit hulpmiddel is het ondersteunen van uw enkel en voet tijdens het lopen. De orthese moet uw voet in de zwaafase van de grond houden om struikelen te voorkomen. Het is dan ook niet meer nodig uw been hoog op te tillen tijdens het lopen.

## GEBRUIK

Het dragen van de orthese gaat doorgaans het beste in schoenen met een veter- of klittenbandsluiting. U kunt de orthese dragen in schoenen met een hakhoogte tussen 1,5 en 2,5 cm. Wij raden u aan hierop te letten bij aanschaf van nieuwe schoenen en de orthese dan meteen te passen in deze schoenen. Laat uw voet in zittende positie (met sok of kous) in de schoen glijden en sluit vervolgens de kuitband en

schoen. Draag het hulpmiddel altijd als u naar buiten gaat. Binnen kunt u de orthese ook dragen, maar dit hoeft niet als het niet noodzakelijk is. Als u de orthese binnen niet draagt, loop dan voorzichtig en voorkom dat u struikelt.

Controleer met name in het begin uw huid op verkleuringen na het dragen van de orthese. Een lichte verkleuring (die binnen vijf minuten na het uittrekken van de beugel verdwijnt) is normaal gesproken geen probleem. Houdt de verkleuring echter langer aan of ervaart u pijn, neem dan contact op met één van onze vestigingen voor een controleafspraak.

## ONDERHOUD

Reinig uw orthese wekelijks met een vochtige doek. Wanneer uw hulpmiddel ook over scharnieren beschikt, smeer deze dan met naaimachineolie. Deze olie heeft een zeer hoge zuiverheid en is zuurvrij.

## GARANTIE

Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorzieningen die afgesproken zijn met zorgverzekeraars. Deze voorwaarden zijn op verzoek bij onze beide vestigingen ter inzage beschikbaar.

## SERVICE

Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze hulpmiddelen. Mocht blijken dat u niet (geheel) tevreden bent over uw hulpmiddel of de manier waarop wij u geholpen hebben, neem dan contact op met één van onze vestigingen. Wij zijn een erkend leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001-gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge eisen die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.



Centrum  
Orthopedie  
Rotterdam